


Instruções para recolher saliva

Preencha o formulário de requisição com as suas informações oficiais. Neste momento, não temos como aceitar nomes sociais.

Observação: O nome e apelido oficial e a data de nascimento na requisição devem corresponder com a informação da etiqueta colocada na amostra.

É necessário seguir as instruções, caso contrário as amostras não poderão ser processadas.

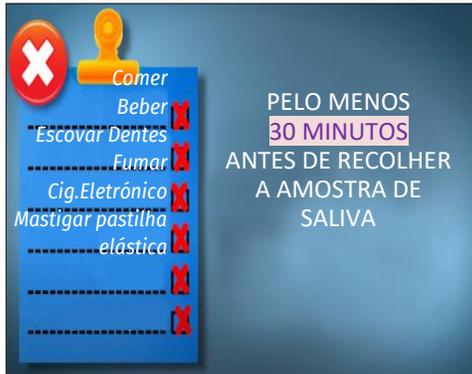

- 1 Antes de finalizar sua amostra, **NÃO** coma, beba, mastigue pastilhas elásticas, fume ou use um cigarro eletrónico por 30 minutos.
- Preencha totalmente o formulário de requisição com suas informações oficiais.



Retire a embalagem do saco e abra, removendo o fundo de papel. Dentro, vai encontrar duas partes - uma tampa com líquido azul dentro e um recipiente com um funil na parte de cima.



Acumule saliva na sua boca sem engolir; depois, cuspa suavemente a saliva para dentro do recipiente com funil.



- 4 É preciso preencher o recipiente com saliva suficiente para alcançar a linha preta que diz "SPIT TO HERE". Bolhas não contam para determinar se já há saliva suficiente. A saliva tem que chegar à linha preta com quaisquer bolhas (se houver) *acima* da linha, o que pode levar uns minutos. Continue a acumular saliva até chegar à linha.



- 5 Depois de recolher saliva suficiente, torça o funil para retirá-lo e deite-o no lixo.



- 6 Coloque a tampa com o líquido azul em cima do recipiente. Verifique que a tampa está na posição certa e feche até ouvir um "clique"; o líquido azul vai misturar-se com a saliva dentro do recipiente. Peça a ajuda de seu pai/mãe ou um adulto para esta etapa.



- 7 Agite suavemente o recipiente 3-5 vezes para misturar tudo.



- 8 Preencha o rótulo com seu nome e apelido oficiais, assim como a sua data de nascimento, e cole horizontalmente no recipiente da amostra de saliva.



- 9 Coloque a sua amostra de saliva rotulada no saco em que ela chegou. Coloque o formulário de requisição totalmente preenchido no bolso externo da bolsa. Entregue a amostra de saliva no local designado até 24 horas após a recolha. A amostra pode ser armazenada a temperatura ambiente; não há necessidade de refrigeração.



Para mais informações e dicas divertidas para crianças, digitalize o código QR para ver o nosso vídeo sobre saliva ou visite <https://youtu.be/Ru-vFZdlmes>

Como digitalizar: ABRA a câmara no seu telefone, APONTE para o código, e TOQUE no banner que vai aparecer.

SickKids[®]