

تعليمات جمع اللعاب

أكمل نموذج الطلب بمعلوماتك القانونية لا يمكننا قبول الأسماء المفضلة هذه المرة.

ملاحظة: يجب ان يتطابق الاسم الأول والأخير، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد على نموذج الطلب مع ما كتب على طابع العينة.


** يجب اتباع التعليمات وإلا لن تتمكن من معالجة العينات. **



3 احتفظ باللعاب في فمك دون بلعه، ثم ابصق اللعاب في حاوية القمع.

2 أخرج العبوة من الكيس وافتحها عن طريق نزع خلف الورقة. ستجد في الداخل قطعتين، غطاء مع سائل أزرق وحاوية مع قمع متصل بالأعلى.

1 قبل أخذ العينة، لا تأكل، تشرب، تمضغ العلكة، لا تدخن أو تستخدم السيجارة الالكترونية "vape" بـ 30 دقيقة على الأقل.
- أكمل نموذج طلب المختبر بالكامل بمعلوماتك القانونية

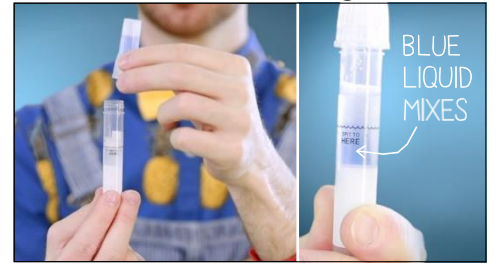

6 ضع الغطاء بالسائل الأزرق فوق الحاوية. تأكد من أن الغطاء يعمل بشكل صحيح ويتم لفه حتى تسمع "نقرة" ويختلط السائل الأزرق في الحاوية. اطلب من أحد والديك أو أحد الكبار مساعدتك في هذه الخطوة.

5 بمجرد جمع ما يكفي من اللعاب، لف القمع وارميه في القمامة.

4 تحتاج إلى ملء الحاوية بما يكفي من اللعاب ليصل إلى السطر باللون الأسود المكتوب عليه "ابصق إلى هنا". أي فقاعات في اللعاب لا تحتسب من الكمية الإجمالية. يرجى التأكد من وصول اللعاب إلى الخط الأسود وبقاء الفقاعات فوق السطر. قد يستغرق الأمر بعض دقائق. استمر في العمل عليه.



9 ضع عينة اللعاب المكتوب عليها المعلومات في الكيس الذي جاءت فيه. أضف النموذج المكتمل في الجيب الخارجي للكيس. يرجى تسليم عينة اللعاب إلى الموقع المناسب بالنسبة لك في غضون 24 ساعة من جمع اللعاب. يمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة، دون الحاجة إلى التبريد.

8 أكمل الملصق باسمك الأول والأخير القانوني، بالإضافة إلى تاريخ الولادة وأصقه بالطول على حاوية عينة اللعاب.

7 رجّ الحاوية برفق 3-5 مرات لخلط كل شيء معا.



لمزيد من المعلومات والنصائح الممتعة للأطفال الصغار، امسح رمز الاستجابة السريعة
QR لمشاهدة فيديو اللعاب أو قم بزيارة: <https://youtu.be/Ru-vFZdImes>

كيفية المسح الضوئي: افتح الكاميرا على هاتفك، صوبها على الرمز، اضغط على اللافتة التي تظهر

SickKids®